

Čtyřkolové chodítko s košíkem a podnosem Roomba

Artil.č. 476647



Příručka

Obsah

předmluva	3
prohlášení o shodě.....	3
životnost.....	3
likvidace.....	3
typový štítek.....	3
znovu použití.....	3
záruka.....	3
díly výrobku.....	4
indikace.....	5
rozsah dodávky.....	5
bezpečnostní pokyny.....	5
rozložení.....	5
složení.....	6
použití tácu.....	6
nastavení výšky rukojeti.....	6
brzdy/parkování.....	6
kontrola koleček.....	6
čištění/údržba.....	6
technická data.....	7

Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a cenné tipy pro správném použití a péči. Pokud máte otázky nebo potřebujete dodatečné informace, obraťte se místního prodejce Drive DeVilbiss, který Vám produkt zaslal.

Tato příručka obsahuje všechny nutné poznámky pro nastavení a obsluhu. Aktuální příručka lze vyvolat online jako PDF nebo si ji můžete vyžádat v zákaznickém servisu.

Zvětšené formáty lze zobrazit osobám se zrakovým postižením. Nevidomé pacienty musí informovat jejich doprovod. Opravy a některé úpravy vyžadují speciální technické školení a musí je proto provádět specializovaná prodejna zdravotnických potřeb.

Prohlášení o shodě

DRIVE MEDICAL GMBH & Co. KG prohlašuje shodu popsaného výrobku v souladu s nařízením o zdravotnických prostředcích (EU) 2017/745.

Životnost

Naše společnost předpokládá, že tento výrobek má životnost pět let za předpokladu, že je výrobek používán ke stanovenému účelu a jsou dodrženy všechny požadavky na údržbu a servis.


Tato životnost může být také samozřejmě překročena, pokud s výrobkem zacházíte opatrně, udržujete jej, pečujete o něj a používáte jej správně. Vzhledem k dalšímu rozvoji vědy a techniky neexistují žádné technické limity.

Extrémním používáním a nesprávným používáním se však může životnost výrazně zkrátit. Stanovení životnosti naší společností nepředstavuje dodatečnou záruku.

Likvidace

Pokud přístroj již více nepotřebujete, kontaktujte prosím vašeho místního prodejce nebo přineste výrobek do vašeho lokálního sběrného dvora.

Typový štítek

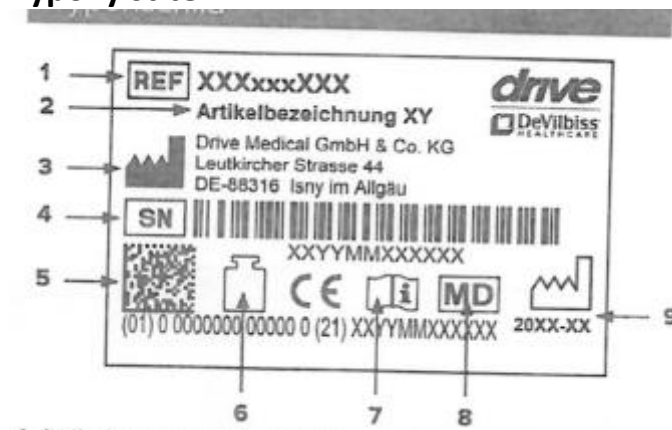

1 číslo výrobku/ 2 označení výrobku/ 3 výrobce/ 4 sériové číslo/ 5 UDI kód/ 6 max. zatížení/ 7 věnujte pozornost příručce/ 8 lékařský výrobek/ 9 datum výroby (rok-měsíc).

Znovu použití

Tento výrobek je vhodný pro opětovné použití. Upozorňujeme, že novému uživateli budou předány i veškeré technické podklady potřebné pro bezpečnou manipulaci.

Výrobek musí být prověřen odborníkem, musí být vyčištěn a uveden do perfektního stavu pro opětovné použití.

Při přípravě musí být dodrženy specifikace výrobce a budou k dispozici na vyžádání.

Dostupné příslušenství naleznete u svého specializovaného prodejce nebo na www.drivedevilbiss.de

Záruka

Na produkt dodaný od nás se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data nákupu. Pokud existují důkazy o materiálové nebo výrobní vadě, budou vadné díly zdarma vyměněny.

Spotřební díly jsou obecně pokryty běžnou záruční dobou, pokud díl nevyžaduje opravu nebo výměnu jako jasný přímý důsledek závady ve zpracování nebo materiálu.

Chyby a změny z důvodu technických vylepšení a konstrukčních změn vyhrazeny.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Opotřebitelné díly jsou (mimo jiné):
kolečka, brzdy a rukojeti

Díly výrobku

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. rukojeť | 7. bowdenzug |
| 2. parkovací brzdy | 8. zadní kolo |
| 3. držák brzdy | 9. brzda |
| 4. táč | 10. rám |
| 5. koš | 11. zámek tácu |
| 6. přední kolo | 12. klip pro nastavení výšky |



INDIKACE:

Porucha hybnosti, pokud dojde k poškození pohybu/koordinace/rovnováhy – ale schopnost chůze je stále dostatečně zachována, pokud použití jiných pomůcek pro chůzi není dostatečné. Pro udržení/podporu/zajištění chůze a stání (návuk chůze).

KONTRAINDIKACE

Použití chodítka není vhodné při: poruchách vnímání, při těžké poruše rovnováhy.

Rozsah dodávky

1x chodítko

1x koš

1x tác

1x příručka


Bezpečnostní pokyny

- Vhodné pouze pro vnitřní použití!
- Chodítko používejte pouze jako pomocníka při chůzi!
- Chodítko používejte pouze na rovném a pevném povrchu.
- Je zakázáno, se na chodítko stavět nebo na chodítku přepravovat jiné osoby či zvířata.
- Respektujte maximální uvedenou hmotnost zatížení uživatele. Tyto údaje se nachází v technických datech v této příručce, stejně tak na typovém štítku.
- Tác používejte jen na malé, lehké předměty – nikoliv na ostré nebo horké předměty. Maximální zatížení: 5,0 kg.
- Použití na eskalátorech je výslovně zakázáno!
- Na rukojeti nevěšete žádné tašky – nebezpečí převrácení!
- Na šikmé cestě používejte provozní brzdu (zatáhněte brzdové páky nahoru).
- Pokud se příliš opřete o rukojeti, chodítko se může převrátit dozadu.
- Při skládání/rozkládání chodítka se do chodítka může skřípnout bečení nebo část těla.
- Chodítko chraňte před slunečním zářením. Díly výrobku se mohou přehřát a při dotyku mohou způsobit poranění kůže.
- Před každým použitím se ujistěte, že není chodítko porušené a že jsou všechny nastavitelné díly řádně připevněny. Prověřte také prosím funkčnost brzd!
- Před použitím chodítka se ujistěte, že je skládací zámek dokonale zajištěn.
- Šrouby na chodítko pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je utáhněte!
- Brzdná účinnost může být snížena opotřebením pneumatik. Proto pravidelně kontrolujte brzdovou účinnost a pneumatiky.
- Chodítko by NEMĚLO být přenášeno za odnímatelné díly nebo za brzdová lanka.
- Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s výrobkem, musí být oznámen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient uveden.

Rozložení


Držte táč vpředu jednou rukou, zvedněte rukojeť a zatáhněte za táč ve směru, jak je znázorněno **na obrázku 1**. Táč je plně otevřen, když uslyšíte cvaknutí.

Pro přezkoušení, zda je zcela otevřen, podržte rukojeť jednou rukou a stiskněte táč druhou rukou ve směru, jak je znázorněno **na obrázku 1**. Chodítko je zcela rozložené a připravené k použití, když uslyšíte zacvaknutí.

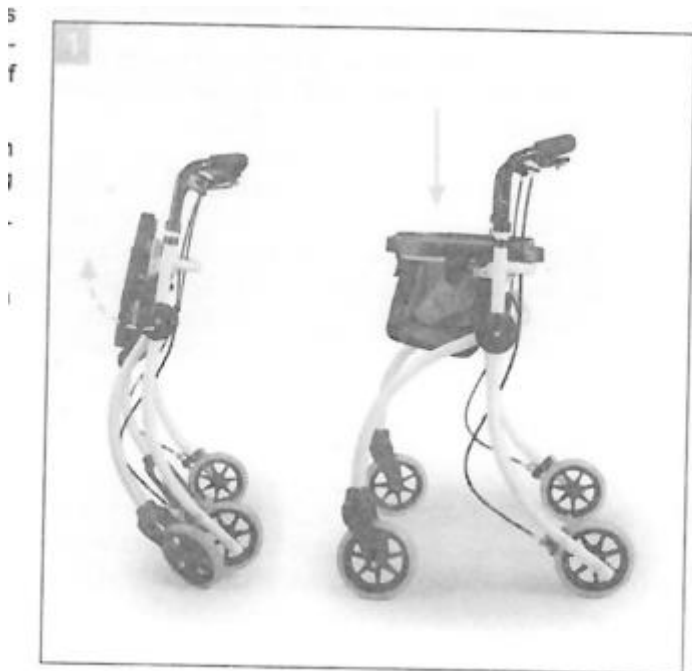

Složení

Vezměte skládací držák tácu a zvedněte jej, jak je znázorněno **na obrázku 2**. Táč je nyní volný a lze jej sklopit.

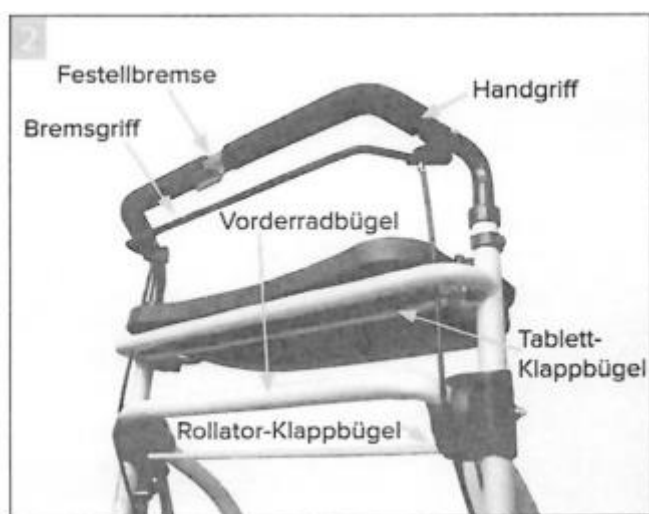

popis obrázku levá strana: rukojeť brzdy, parkovací brzda

popis obrázku střed: držák předního kola, skládací držák chodítka

popis obrázku pravá strana: rukojeť, skládací držák tácu

Jednou rukou uchopte rukojeť a druhou rukou uchopte střed přední tyče pro kola. Potom prsty vytáhněte skládací tyč chodítka nahoru.

Jakmile jej vytáhnete úplně nahoru, sklopte chodítko nahoru zatlačením tyče od předního kola.

Použití tácu

Před použitím prověřte, zda je tác správně zamontován. Jinak postupujte následovně, abyste tác přimontovali:

Držte tác oběma rukama za západky tácu, viz části chodítka č. 11, a držte je, dokud tác nebude ve správné poloze. Když se rohy tácu dotýkají rámu na držáku, zatlačte západky mírně dolů. Zkontrolujte, zda tác pevně sedí na držáku nad taškou. Zkontrolujte, že se rohy tácu dotýkají rámu jen lehce, aby se rám nepoškodil.

Jinak může dojít k narušení funkce tácu. Držte tác oběma rukama za západky tácu a zvednutím západky na držáku ji uvolněte. Poté vyjměte naplocho tác.

Nastavení výšky rukojeti

Odstraňte pojistnou matici a vytáhněte rukojeť do požadované výšky (**obrázek 3**).



Namontujte pojistnou matici (**obrázek 4**).



Brzdy/parkování

Chcete-li zabrzdít, zatáhněte prstem nahoru za rukojeť brzd. Chcete-li brzdu zablokovat, uchopte rukojeť oběma rukama a stisknutím červené parkovací brzdy chodítko zajistěte.

Pokud uslyšíte cvaknutí, je správně zajištěno. Chcete-li parkovací brzdu uvolnit, znovu stiskněte červenou parkovací brzdu. Pokud uslyšíte cvaknutí, brzda se uvolní.

Kontrola koleček

Kolečka čistěte vodou nebo jemným čisticím prostředkem, osušte je čistým hadříkem.

Pokud kolečka skřípou, lehce naolejujte osy kol údržbovým nebo ošetřovacím olejem.

Čištění/údržba

- Pravidelně ručně čistěte vlhkým hadříkem!
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky!
- Nepoužívejte žádné brusné prostředky!
- Nepoužívejte čističe s vysokými dávkami chlóru nebo octa!
- Pro dezinfekci můžete použít dezinfekční prostředek ve spreji, například Descosept AF nebo Bacillol AF.
- Šrouby pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je utáhněte!
- Výrobek nesmí být dlouhodobě vystavován teplotám přes 60 °C (například použití v sauně atd.).
- Při defektech vyhledejte svého prodejce, od které jste výrobek získali.
- Pravidelně kontrolujte stav pneumatik. Jsou „odolné proti propíchnutí“, což znamená, že není třeba kontrolovat tlak vzduchu nebo doplňovat vzduch. Vždy ale zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené.

Technická data

výrobek	ROOMBA
číslo výrobku	730200100
celková délka	51,5 cm
celková šířka	57 cm
celková výška	94,1 cm
výška rukojeti	81,4 - 94,1 cm
šířka mezi zadními kolečky	44 cm
rozměr složeného	29 x 55 x 83 cm
hmotnost	5,6 kg
maximální zatížení	100 kg
materiál rámu	hliník