

REHAFORUM MEDICAL

Actimo Delta Artikl. 6815227



Přečtěte si důkladně celou příručku dříve, než budete Actimo Delta sestavovat, nastavovat nebo poprvé používat. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Zamýšlené použití

Chodítko pro podporu chůze osob s omezenou pohyblivostí a mobilitou. Táč, košík a taška na přepravu nádobí a předmětů pro každodenní potřeby.

Indikace

Actimo Delta lze použít při mírných poruchách rovnováhy a omezené pohyblivosti v důsledku ztráty síly nebo snížené pohyblivosti. Pro udržení fyzické aktivity je Actimo Delta vhodný pro použití uvnitř i venku.

Montáž/instrukce: S instalací vám rád pomůže váš odborný prodejce nebo ošetřující personál

1. Před vybalením prověřte, zda není poškozený karton. Pokud by měl být poškozen obsah, kontaktujte neprodleně svého odborného prodejce. Actimo Delta se dodává připravený k použití, smontovaný odborným prodejcem případně pečujícím personálem a jsou zkontrolovány všechny funkce.
2. Technik/odborný prodejce nastaví výšku rukojeti podle uživatele.
3. Actimo Delta rozložte ve směru jízdy a zajistěte jej. Ujistěte se, že je západka pevně zatažena, aby se chodítko nesložilo.
4. Pro rozložení umístěte chodítko ve směru jízdy. Uchopte chodítko za rukojeti a odtáhněte je od sebe. Pokud je to trochu obtížné, odtlačte rám od sebe pomocí koleček. Nyní zatlačte rychlo-západku na skládacím mechanismu až na doraz, dokud nezapadne na místo.

5. Pro složení položte Actimo Delta čelem ve směru jízdy se zapnutými brzdami. Odstraňte veškeré příslušenství. Jednou rukou uchopte vozík za rukojeť a druhou rukou přitáhněte rychlo-západku směrem ke skládacímu mechanismu. Pokud je obtížné s ním pohybovat, stlačte rám u koleček.
6. Chcete-li namontovat rukojeti, odstraňte černé ochranné krytky z konců tyčí u rámu. Vložte trubky rukojeti do otvorů. Rukojeti jsou připevněny aretačními pákami a lze je nastavit do správné výšky pro každého uživatele. Zajišťovací páčky musí směřovat ven.



Bezpečnostní pokyny

1. Při nastavování výšky lze trubky rukojeti táhnout pouze po hranici hrubého povrchu.
2. Při skládání hrozí nebezpečí přivření prstů, rukou a oděvu. Actimo Delta nemá ve složeném stavu již žádnou stabilitu.
3. Pokud není správně nastavena výška, umístěte Actimo Delta ve směru jízdy a zabrzděte jej. Povolte zajišťovací šrouby, nastavte výšku a šrouby znovu utáhněte.
4. Chodítko není invalidní vozík, ale slouží pouze jako pomůcka při chůzi.
5. Actimo Delta je k použití na rovném povrchu. Maximální hmotnost uživatele činí 120 kg.
6. Při použití na svazích může být rychlost koleček vyšší než rychlost chůze. Pokud je Actimo Delta nakloněn příliš na stranu, hrozí nebezpečí převrácení (úhel náklonu > 5°). Přílišné opírání o rukojeti může způsobit převrácení chodítka dozadu.
7. Před každým použitím zkontrolujte brzdy!

Údržba

Chodítko Actimo Delta je bezúdržbové. Pokud potřebujete opravu/rekonstrukci, obraťte se prosím na svého prodejce.

Pro uskladnění lze chodítko složit. Před použitím musí být chodítko opět rozloženo.



Funkční chyba:

Efektivitu brzd ovlivňuje opotřebení koleček. Pokud zaznamenáte změnu brzdného účinku, kontaktujte svého prodejce.

Brzdy

Dvě ruční brzdy pro zadní kola (*b*) s bowdenem (*a*) a držáky brzd. Chcete-li seřídit parkovací brzdu, stiskněte současně obě brzdové páčky, dokud slyšitelně nezacvaknou na místo. Ty lze opět uvolnit krátkým povytažením. Vždy používejte obě brzdy současně. Brzdy budou seřízeny po dodání. Pro technickou podporu prosím kontaktujte svého místního prodejce.

Rozsah dodávky/skladování

Actimo Delta

1 koš, 1 táč, 1 taška, 1 příručka

Chodítko chraňte před vlhkostí a umístěte jej na bezpečné místo, aby byly tyče a kolečka ochráněny před poškozením!

Technická data/rozměry a hmotnost

- ✓ šířka: 62 cm
- ✓ délka: 58 cm
- ✓ složené rozměry: 24 cm
- ✓ výška: 80-92 cm
- ✓ hmotnost: 7 kg
- ✓ kolečka: 19 cm
- ✓ maximální zatížení: 120 kg
- ✓ maximální hmotnost pro koš, táč nebo tašku: 5 kg

Čištění

Chodítko byste měli čistit nebo dezinfikovat v pravidelných intervalech (nezbytné je to při změně uživatele). Používejte jemnou mýdlovou vodu bez abrazivních přísad a měkký hadřík. Dezinfikovat můžete běžně dostupným prostředkem podle pokynů výrobce, např. Descosept AF. Nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky ani vysokotlaké nebo parní čističe! Dávejte pozor na to, aby se na pneumatikách a brzdách nehromadily nečistoty. Tyto nečistoty pak můžete odstranit kartáčem a teplou vodou.

Kontraindikace

Použití chodítka Actimo delta není žádoucí u osob s

- s poruchou vnímání, se sníženým viděním
- se silnou poruchou rovnováhy
- amputovanými končetinami nebo s poškozenými klouby

Likvidace

Opotřebované chodítko představuje cenný zdroj materiálu, který lze vrátit do průmyslového koloběhu. Proto chodítko, které chcete zlikvidovat, nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale nechte jej odborně zlikvidovat ve státem schváleném sběrném místě. Příslušné informace vám ochotně poskytne vaše místní služba pro sběr odpadu.

Záruka

Záruka činí 24 měsíců a vztahuje se na všechny vady výrobku, které lze prokázat jako důsledek výrobních nebo materiálových vad.

Výrobce

Daimlerstr. 12 a

25337 Elmshorn

Tel.: +49 4121 473312

Fax: +49 4121 473323

info@rehaforum.com

www.rehaforum.com

Druh: 80003507

Vyhotoveno 09/2021